

# Accu-Tell<sup>®</sup> Multi-7 Drug Panel (Urine)



**TELAH MEMENUHI SYARAT  
ADMINISTRASI LEGAL FORMAL BNN\***

KEMENKES RI AKL 20103220070

\*Badan Narkotika Nasional




**Accu-Tell<sup>®</sup> Multi-7 Drug Panel (Urine)** adalah immunoassay kromatografi cepat untuk deteksi kualitatif beberapa zat/metabolit obat dalam urin



Parameter 7 pemeriksaan:

- Amfetamin (AMP)
- Metamfetamin (MET)
- Benzodiazepin (BZO)
- Mariyuana/Ganja (THC)
- Morfin (MOP)
- Kokain (COC)
- Carisoprodol (CAR)

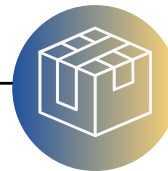

**1 box Accu-Tell<sup>®</sup> Multi-7 Drug Panel (Urine)** berisi:

- 15 panel uji
- 7 lembar insert pack

Importir dan Distributor Resmi:

**PT ISOTEKINDO INTERTAMA**

 Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210 |  (021) 5305073-74 |  0811.171.0055

 info@isotekindo.co.id |  www.isotekindo.co.id |  isotekindo intertama |   @isotekindo



linktr.ee/isotekindo

20250227/FZR


### PREPARASI SAMPEL

- Sampel urin harus disimpan dalam wadah yang bersih & kering.
- Sampel urin yang digunakan untuk pengujian bisa menggunakan urin kapan saja (tidak harus urin pagi).
- Apabila sampel urin terlihat keruh, maka harus disentrifugasi, disaring, atau dibiarkan mengendap terlebih dahulu untuk mendapatkan sampel yang jelas untuk pengujian.
- Sampel urin dapat disimpan pada suhu 2-8°C hingga 48 jam sebelum pengujian.
- Untuk penyimpanan yang lama, sampel dapat dibekukan dan disimpan di bawah -20°C. Sampel urin yang beku harus dicairkan dan dicampur dengan baik sebelum pengujian.

### PROSEDUR PENGGUNAAN

Sebelum dilakukan pengujian, kondisikan kaset uji & sampel urin ke suhu ruangan (15-30°C).

1. Buka kemasan foil dan keluarkan kaset uji. Segera gunakan kaset uji dalam batas waktu 1 jam.
2. Lepaskan tutup kaset uji.
3. Rendam kaset uji ke dalam sampel urin secara vertikal selama 10-15 detik. Benamkan strip minimal setinggi garis bergelombang dan jangan melebihi tanda panah diatas panel uji.
4. Pasang kembali tutup kaset dan letakkan kaset uji pada permukaan datar yang tidak menyerap.
5. Mulai *timer* dan tunggu hingga garis berwarna muncul.
6. Hasilnya harus dibaca pada 5 menit. **Jangan menafsirkan hasil setelah 10 menit.**

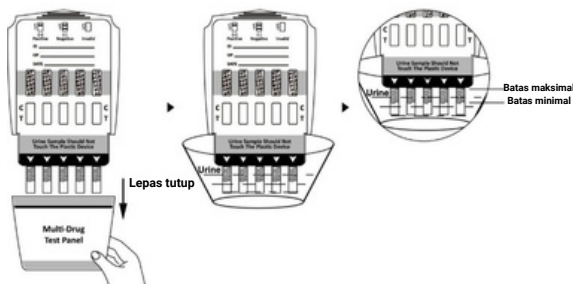

### NILAI CUT-OFF

- Amfetamin (AMP) 500 ng/mL
- Metamfetamin (MET) 500 ng/mL
- Benzodiazepin (BZO) 300 ng/mL
- Mariyuana (THC) 50 ng/mL
- Morfin (MOP) 300 ng/mL
- Kokain (COC) 300 ng/mL
- Carisoprodol (CAR) 1.000 ng/mL

**Accu-Tell® Multi-7 Drug Panel (Urine)** akan memberikan hasil positif ketika konsentrasi zat dalam urin melebihi nilai *cut-off*.

### INTERPRETASI HASIL

**HASIL POSITIF:** Garis berwarna hanya muncul di wilayah Kontrol (C). Hasil positif berarti bahwa konsentrasi obat dalam sampel urin lebih besar dari nilai *cut-off* yang ditentukan untuk obat tertentu.

**HASIL NEGATIF:** Terbentuk dua garis berwarna di wilayah kontrol (C) dan di wilayah tes (T). Hasil negatif berarti bahwa konsentrasi dalam sampel urin berada di bawah nilai *cut-off* yang ditentukan untuk obat tertentu yang diuji.  
*Note: Intensitas warna garis akan bervariasi. Jika garis warna di area uji (T) tampak samar, hasil tes dianggap NEGATIF.*

**HASIL INVALID:** Tidak ada garis yang muncul di wilayah Kontrol (C). *Ulangi tes dengan kaset uji yang baru. Volume sampel yang tidak cukup atau teknik prosedur yang salah dapat menyebabkan hasil invalid.*

C  
T Positif

C  
T Negatif

C  
T Invalid

Importir dan Distributor Resmi:

**PT ISOTEKINDO INTERTAMA**

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210 | (021) 5305073-74 | 0811.171.0055

info@isotekindo.co.id | www.isotekindo.co.id | isotekindo intertama | @isotekindo



linktr.ee/isotekindo

20250227/FZR