

ACCU-TELL[®] MALARIA P.F./P.V./PAN CASSETTE (WHOLE BLOOD)

Sensitivitas P.f. : >99.9%
Sensitivitas P.v. : 98%

Spesifisitas : 99.9%
Akurasi : 99.8%



KEMENKES RI AKL

Tes cepat dengan metoda imunokromatografi untuk deteksi kualitatif empat jenis plasmodium dalam darah lengkap yaitu:

- P. falciparum (P.f.)
- P. vivax (P.v.)
- P. ovale (P.o.)
- P. malariae (P.m.)

Isi 1 box:

- 20 kaset tes
- 1 botol buffer
- 20 pcs droppers
- 1 lembar insert pack

Importir dan Distributor Resmi:

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

 Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210 |  (021) 5305073-74 |  0811.171.0055

 info@isotekindo.co.id |  www.isotekindo.co.id |  isotekindo intertama |  |  @isotekindo



linktr.ee/isotekindo


PROSEDUR PENGGUNAAN

Kondisikan kaset uji, sampel uji (spesimen), buffer, dan/atau cairan kontrol pada suhu kamar (15-30°C) sebelum pengujian

1. Buka kemasan foil dan keluarkan kaset uji. Segera gunakan kaset uji dalam batas waktu 1 jam
2. Letakkan kaset uji pada permukaan yang datar dan bersih

PENGUJIAN DENGAN SAMPEL DARAH VENA/KAPILER:

1. Pegang mikropipet/pipet tetes di posisi tegak atau vertikal
2. Gunakan pipet untuk mengambil sampel sampai batas garis (5 µL) dan teteskan sampel pada lubang sampel kaset uji
3. Tambahkan 3 tetes buffer (180 µL) pada lubang buffer kaset uji
4. Tunggu hingga garis berwarna muncul. Baca hasil pada 10 menit. **Jangan menafsir hasilnya setelah 20 menit.**

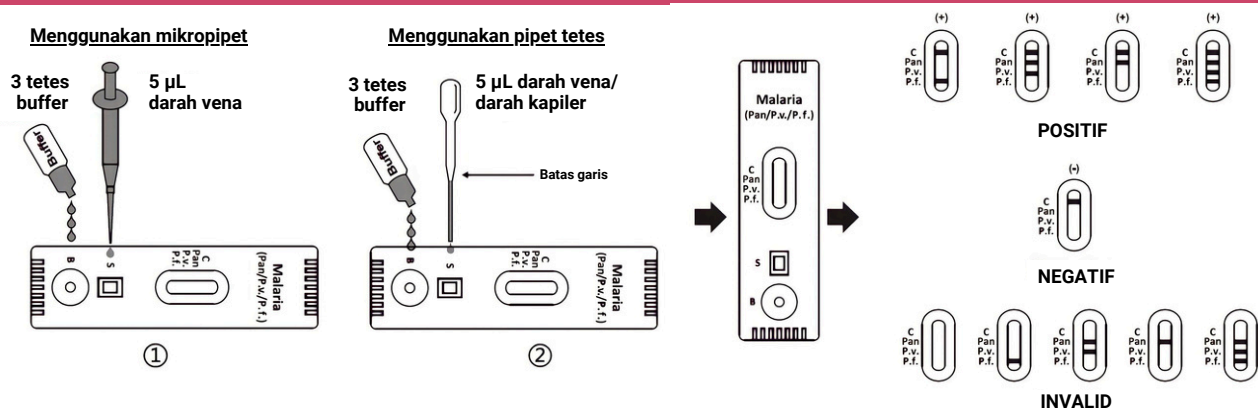

INTERPRETASI HASIL

POSITIF: Muncul dua atau tiga atau empat garis berwarna. Garis berwarna di area kontrol (C) dan garis warna di area uji (Pan/P.v./P.f.)

Note: Intensitas warna garis bervariasi konsentrasi antigen, yaitu, HRP-II, LDH spesifik P. vivax atau LDH spesifik Pan dalam sampel. Jika garis warna di area uji tampak samar, hasil tes dianggap POSITIF

NEGATIF: Muncul satu garis warna (C). Garis berwarna di area kontrol (C)

INVALID: Tidak muncul satu garis warna di area kontrol (C).

Ulangi tes dengan kaset uji yang baru. Volume sampel yang tidak cukup atau teknik prosedur yang salah dapat menyebabkan hasil invalid

Importir dan Distributor Resmi:

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210 | (021) 5305073-74 | 0811.171.0055

info@isotekindo.co.id | www.isotekindo.co.id | isotekindo intertama | @isotekindo



linktr.ee/isotekindo