

ALAT PERIKSA GULA DARAH DENGAN FITUR CODE FREE* & AST**



KEMENKES RI AKL 20101917636 (Alat)
KEMENKES RI AKL 20101915723 (Strip Glukosa)

Spesifikasi Glucose Sure Autocode

- ***CODE FREE.** Tidak membutuhkan *code card*
- ****ALTERNATE SITE TESTING (AST),** sampel dapat diambil selain dari jari. misalnya; paha & telapak tangan
- Sampel darah sedikit (0.5 μ L)
- Waktu pengukuran cepat (6 detik)
- Rentang ukur: 20-600 mg/dL (1,1-33,3 mmol/L)
- Menyimpan 300 memori, disertai tanggal & waktu
- Dapat terkoneksi PC

Importir dan Distributor Resmi:

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210 | (021) 5305073-74 | 0811.171.0055

info@isotekindo.co.id | www.isotekindo.co.id | isotekindo intertama | @isotekindo



linktr.ee/isotekindo

20250312/FZR

CARA PENGGUNAAN

Glucosure AutoCode



Langkah 1

Setelah baterai dipasang, masukkan strip tes ke dalam alat dan alat otomatis akan menyala.



Langkah 2

Tusuk jari menggunakan lancet agar sampel darah keluar dengan cukup.



Langkah 3


Tempelkan tes strip ke tetesan darah sampai alat berbunyi 'bip', untuk menunjukkan strip tes sudah terisi cukup darah untuk diuji.



Langkah 4

Layar akan menghitung mundur selama 6 detik & hasil pengukuran gula darah akan muncul pada layar.

PERFORMA AKURASI PRESISI UJI GLUKOSA MENURUT ISO1597:2015

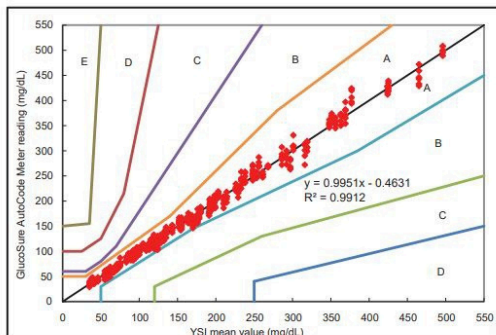

Kesimpulan:

Hasil pengukuran gula darah menggunakan **Glucosure AutoCode** yang dibandingkan terhadap **YSI 2300 Glucose Analyzer** menunjukkan hasil yang *comparable* dengan nilai regresi 0.9959.

ISO 15197 : 2015		
Sample < 100 mg/dL		
±5 mg/dL	±10 mg/dL	±15 mg/dL
125 / 180	174 / 180	180 / 180
69%	97%	100.0%
Sample ≥100 mg/dL		
±5%	±10%	±15%
271 / 420	397 / 420	419 / 420
65%	95%	99.8%

Importir dan Distributor Resmi:

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210 | (021) 5305073-74 | 0811.171.0055

info@isotekindo.co.id | www.isotekindo.co.id | isotekindo intertama | @isotekindo



linktr.ee/isotekindo

20250312/FZR