

ACCU-TELL[®] TYPHOID CASSETTE (WHOLE BLOOD/SERUM/PLASMA)



NIE AKL 20303320961

Tes cepat metoda imunokromatografi untuk deteksi kualitatif kadar antibodi IgG dan IgM terhadap *Salmonella typhi* dalam spesimen darah utuh, serum, atau plasma

IgG

- Sensitivitas: 89.5%
- Spesifisitas: 97.2%
- Akurasi: 96.5%

IgM

- Sensitivitas: 87.9%
- Spesifisitas: 97.4%
- Akurasi: 96.3%

Isi 1 box

- 25 kaset tes
- 1 botol buffer
- 25 pipet kapiler plastik
- 1 lembar petunjuk penggunaan

Importir dan Distributor Resmi:

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210 | (021) 5305073-74 | 0811.171.0055

info@isotekindo.co.id | www.isotekindo.co.id | isotekindo intertama | @isotekindo



linktr.ee/isotekindo

PROSEDUR PENGGUNAAN

Kondisikan kaset uji, sampel uji (spesimen), buffer, dan/atau cairan kontrol pada suhu kamar (15-30°C) sebelum pengujian


1. Buka kemasan foil dan keluarkan kaset uji. Segera gunakan kaset uji dalam batas waktu 1 jam
2. Letakkan kaset uji pada permukaan yang datar dan bersih

PENGUJIAN DENGAN SERUM/PLASMA

- Pegang mikropipet/pipet tetes di posisi tegak atau vertikal
- Gunakan pipet untuk mengambil sampel serum/plasma dan meneteskan 1 tetes (40 µL) sampel pada lubang sampel kaset uji
- Tambahkan 1 tetes buffer (40 µL) pada lubang sampel kaset uji
- Tunggu hingga garis berwarna muncul. Baca hasil pada 15 menit. Jangan menafsir hasilnya setelah 15 menit

PENGUJIAN DENGAN DARAH VENA/KAPILER

- Pegang mikropipet/pipet tetes di posisi tegak atau vertikal
- Gunakan pipet untuk mengambil sampel darah vena/kapiler dan meneteskan 1 tetes (40 µL) sampel pada lubang sampel kaset uji
- Tambahkan 2 tetes buffer (80 µL) pada lubang sampel kaset uji
- Tunggu hingga garis berwarna muncul. Baca hasil pada 15 menit. Jangan menafsir hasilnya setelah 15 menit

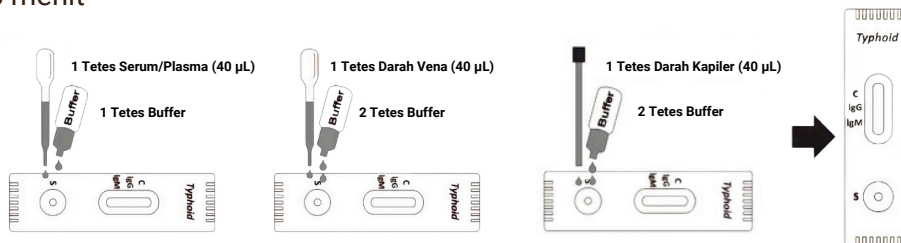

INTERPRETASI HASIL

Importir dan Distributor Resmi:

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210 | (021) 5305073-74 | 0811.171.0055
info@isotekindo.co.id | www.isotekindo.co.id | isotekindo intertama | @isotekindo



linktr.ee/isotekindo