


DETERJEN-DISINFECTAN
ALAT KESEHATAN
KELAS IIa

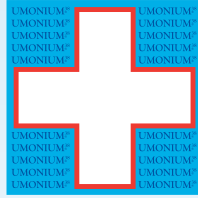

UMONIUM³⁸ EQUIPMENTS



FORMULA BEBAS DARI

- KOMPONEN CMR**
- DISRUPTOR ENDOKRIN

** Carcinogenic, Mutagenic and Reprotoxic

“ Deterjen-disinfektan untuk alat kesehatan non-invasif ”



UMONIUM³⁸ EQUIPMENTS merupakan deterjen-disinfektan ultra-kuat untuk alat kesehatan non-invasif, sangat andal dan tidak sensitif dengan kondisi gangguan. Mampu menghancurkan mikroorganisme dalam waktu kontak yang sangat singkat (10 menit). *Polycompatible*, dapat digunakan dengan aman pada berbagai macam bahan seperti karet, polikarbonat, senyawa akrilik, kaca, Pyrex dan lainnya. Dosis 0,5% (25 mL/5 L) memungkinkan pembersihan jejak darah dan bahan biologis lainnya dengan cermat, pengaplikasian dosis 2,5% memastikan desinfeksi untuk situasi yang paling kritis.

Importir dan Distributor
Resmi: PT ISOTEKINDO
INTERTAMA



www.huckerts.net



UMONIUM³⁸ EQUIPMENTS



FORMULA BEBAS DARI

- KOMPONEN CMR**
- DISRUPTOR ENDOKRIN

INDIKASI

Pembersihan dan disinfeksi untuk alat kesehatan non-invasif dan disinfeksi permukaan.

KOMPOSISI

N-benzil-N-dodesil-N,N-dimetil-amonium klorida/N-benzil-N,N-dimetil-N tetradecilamonium klorida. 99g/L.

STANDAR PERATURAN

- Mematuhi ED 93/42/EEC yang berkaitan dengan perangkat medis (lampiran II, kecuali. §4)
- Kualitas & keterlacakan dijamin oleh ISO 9001:2015 dan EN ISO 13485:2016

INSTRUKSI PENGGUNAAN

Pembersihan/Pre-disinfeksi: Gunakan 0,5% (25 mL/5 L air*). Lap dengan kain basah untuk menghilangkan semua kotoran. Bilas dengan air* atau menggunakan kain yang dibasahi air*.

Disinfeksi: Gunakan pada 2,5% (25 mL/L air*) pada alat kesehatan yang bersih. Aplikasikan dengan kain basah atau direndam, pastikan untuk mematuhi waktu kontak minimum 10 menit. Biarkan hingga kering atau bilas dengan air* (atau gunakan kain yang dibasahi air*) jika perlu.

KARAKTERISTIK PRODUK

- Alat Kesehatan Kelas IIa
- Deterjen-disinfektan dengan spektrum aktivitas yang luas
- Tidak beracun, tidak ada uap berbahaya
- LD₅₀ (tikus): 5840 mg/kg
- Non-korosif: pH 7
- Tidak mengiritasi kulit (tidak ada toksisitas transdermal)
- Bebas aldehida, peroksida dan biguanida, tidak ada komponen karsinogenik, mutagenik, reprotoksik lainnya
- Non-koagulan
- Tidak mudah terbakar
- Bakterisida, fungisida, mikobakterisida (termasuk MRSA) dan virusida
- 100% kompatibel pada serat optik, karet, polikarbonat, senyawa akrilik, kaca, Pyrex, PU, PVC, HDPE, PET, neoprene, lateks, silikon, cat, dan baja tahan karat 410
- Efektif, cepat dan efisien (dalam melarutkan darah)
- Efektif dengan adanya bahan organik
- Waktu disinfeksi: 10 menit.
- Tetap pada permukaan yang tidak dibilas (film bakteriostatik)
- Tidak ada residu setelah dibilas
- Stabilitas: 36 bulan sejak tanggal pembuatan
- Dapat terurai secara hayati

* Air minum bersih pada suhu kamar
** Carcinogenic, Mutagenic and Reprotoxic




NO BARANG	NAMA BARANG	BOKS
PF 12310	Botol 1 Liter	12 x 1 L
PF 12312	Galon 5 L dengan pompa	4 x 5 L
PF 12314	Botol 125 mL	24 x 125 mL
EMB 0013	ECONOMATIC pompa kit lengkap - Dosis 0.5 %	1 barang
EMB 0013 - 2.5%	ECONOMATIC pompa kit lengkap - Dosis 2.5 %	1 barang

PROSEDUR PENGGUNAAN

LANGKAH 1 : PEMBERSIHAN/PRE-DISINFEKSI

➔ Penggunaan bath secara batch

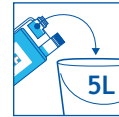

Gunakan pada 0,5% (25 mL/5 L air*)




Lap dengan kain basah untuk menghilangkan semua kotoran



Bilas dengan air* atau gunakan kain basah untuk membersihkan permukaan.

LANGKAH 2 : DISINFEKSI

➔ Rendam sampai terlihat keruh

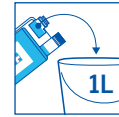


Gunakan pada 2,5% (25 mL/L air*)



Aplikasikan dengan kain basah atau direndam



Patuhi waktu waktu kontak minimum 10 menit

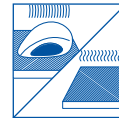

Biarkan hingga mengering atau bilas dengan air (atau gunakan kain basah) jika perlu.

DATA TEKNIS

Standar	Target organisme	Waktu Kontak (min.) 2.5 %
EN 1040	<i>S. aureus</i> , <i>P. aeruginosa</i>	5
EN 13727	<i>S. aureus</i> , <i>E. hirae</i> <i>P. aeruginosa</i>	10
EN 14561	<i>S. aureus</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>E. hirae</i>	30
-	MRSA, ESBL-producing <i>Klebsiella pneumoniae</i>	5
EN 1275	<i>C. albicans</i>	10
EN 13624 EN 14562	<i>C. albicans</i> , <i>A. niger</i>	
EN 14476	Adenovirus, Poliovirus, Norovirus	1
-	HBV, HSV, HCV, H5N1	5
EN 14348	<i>M. avium</i> , <i>M. terrae</i>	10
EN 14563		

FP00042 EN - Ed. 3.2 - 02/2019

www.huckerts.net



BELGIUM
20 Avenue Lavoisier
1300 Wavre
Tel.: +32 (0)67 89 41 00
Fax: +32 (0)67 84 37 67

FRANCE
38 Avenue du Centre
78230 Le Pecq-sur-Seine
Tel.: +33 (0)1 3976 1505
Fax: +33 (0)1 3976 1115

G.D. LUXEMBOURG
19 Rue de l'Industrie
8069 Bertrange
Tel.: +352 26 39 42 60
Fax: +352 26 39 42 70

ITALY
20 Via Giulio Natta
05100 Terni
Tel.: +39 0744 80 03 87
Fax: +39 0744 81 73 39

SINGAPORE
51 Changi Business Park Central 2
The Signature, #04-05
Singapore 486066
Tel.: +65 983 45 333

Importir dan Distributor Resmi

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, 12210 | 021-5305073/74 | 0811-171-0055
info@isotekindo.co.id | www.isotekindo.co.id | Isotekindo Intertama | @isotekindo



https://linktr.ee/isotekindo