

DETEKSI KANKER SEJAK DINI

CY-100 Processor



KEMENKES RI AKL 10203818012 (Alat)
KEMENKES RI AKL 10302513628 (Cervix Brum)

Importir dan Distributor Resmi:

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210 | (021) 5305073-74 | 0811.171.0055

info@isotekindo.co.id | www.isotekindo.co.id | isotekindo intertama | @isotekindo



linktr.ee/isotekindo

20230502/RIM

CY-100 Processor

FITUR DAN MANFAAT



Terdapat fitur keamanan arus *cut-off*



Prinsip Operasi Mudah



Tersertifikasi ISO 13458



Dapat digunakan untuk sampel *non Gynae cytology*



Dilengkapi Slide *IHC Link* bermuatan positif



Metode *Liquid Base Cytology*

- Lebih dari 90% sel dapat diperiksa
- Fiksasi sel lebih baik, sehingga ukuran sel dapat dipertahankan
- Sel dipisahkan dari debris, lendir & darah
- Sel dapat disimpan lebih lama pada suhu ruang (3 minggu)

CARA PENGGUNAAN

Langkah 1

Colokkan kabel daya ke sumber daya 220V.

Langkah 2

Hidupkan processor. Tempatkan kaca *slide* dengan ujung buram putih menghadap ke bawah kedudukan *slide*.

Langkah 3

Masukkan filter ke penahan filter putar searah jarum jam untuk mengunci.

Langkah 4

Sebelum memasukkan spesimen, kocok vial selama 5 detik.

Langkah 5

Tuangkan 2 - 3 ml spesimen ke dalam filter ganda, dan tekan tombol *start*.

Langkah 6

Lepaskan slide yang diproses dengan sel-sel di atasnya dari lengan dudukan kaca *slide*, dan juga filter yang digunakan dari penahan filter dengan memutar berlawanan arah jarum jam.

SPESIFIKASI

| No | Parameter | Keterangan |
|----|-------------------|---|
| 1 | Dimensi | (P) 390 X (L) 270 X (T) 210 (Unit : mm) |
| 2 | Berat | ± 10 Kg |
| 3 | Konsumsi Daya | 37 W |
| 4 | Jenis tampilan | LED 8 Digit |
| 5 | Fitur Keamanan | Arus <i>cut-off</i> . Sekering listrik (250 V, 2A) dipasang di kabel <i>Power</i> |
| 6 | Tegangan input | AC 220 V, 60 Hz |
| 7 | Tujuan Penggunaan | Untuk persiapan sitologi dari spesimen cairan |

Importir dan Distributor Resmi:

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210 | (021) 5305073-74 | 0811.171.0055

info@isotekindo.co.id | www.isotekindo.co.id | isotekindo intertama | @isotekindo



linktr.ee/isotekindo

20230502/RIM