






PERANGKAT SCREENING HEMOGLOBIN & HEMATOKRIT DARAH

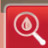

-  Sampel
1 μ L
-  Hasil
5 detik
-  Strip
ejector
-  Hb/Hct
Display
-  Splash
proof
IPX 4

1 box = 25 strip



KEMENKES RI AKL 20205512741 (Strip)

KEMENKES RI AKL 20205611169 (Alat)

HemoSmart™ GOLD

Importir dan Distributor Resmi:
PT ISOTEKINDO INTERTAMA


Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210 | (021) 5305073-74 | 0811.171.0055
info@isotekindo.co.id | www.isotekindo.co.id | isotekindo intertama | @isotekindo




linktr.ee/isotekindo

20250114/FZR

CARA PENGGUNAAN

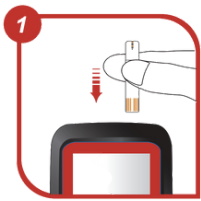

Masukkan strip ke alat

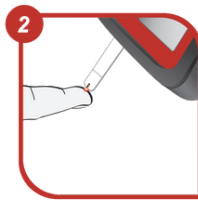

Setelah muncul tanda tetesan darah pada alat, tempelkan jari yang berisi sampel ke strip tes




Tunggu hasil selama 5 detik

SPESIFIKASI ALAT

Parameter	Keterangan
Kisaran Uji	4-24 g/dL
Tipe Tampilan	Layar LCD Besar
Memori	100 hasil tes darah dengan tanggal dan waktu
Waktu Penyimpanan Memori	7, 14, dan 30 hari
Ukuran	124 x 75 x 20 mm
Berat	120 g
Baterai	2 Baterai Alkaline AAA
Sampel	Darah Kapiler segar dan Vena
Volume sampel	1 µL
Waktu Pengukuran	5 detik
Daya tahan baterai	1.000 tes penggunaan
Matikan Otomatis	Setelah 2 menit tidak aktif

PERFORMA AKURASI PRESISI

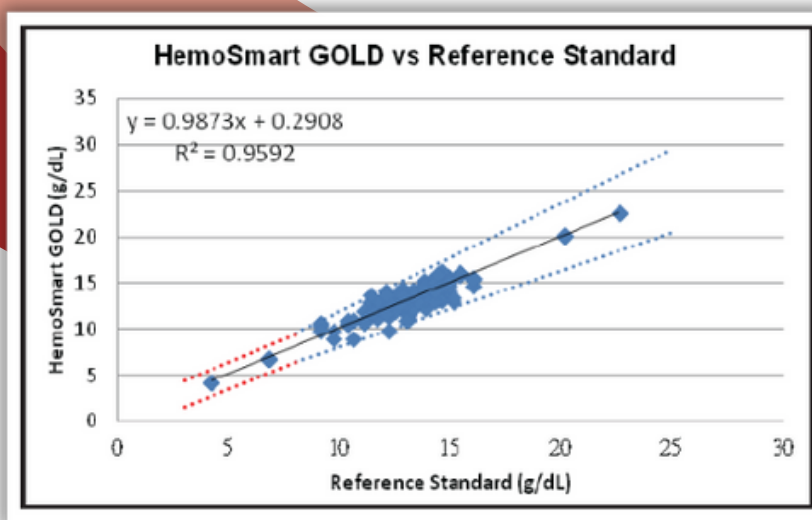

Number of reading	100	100	100	100	100
Mean (g/dL)	7.6	10.3	12.9	16.6	21.8
S.D. (g/dL)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3
C.V. %	3.5	3.8	2.9	2.7	1.5

Kesimpulan:
Hasil pengukuran menggunakan **HemoSmart GOLD** yang dibandingkan terhadap *Beckman Coulter Ac.T Analyzer* menunjukkan hasil yang *comparable* dengan nilai regresi 0.9592.

Importir dan Distributor Resmi:

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210 | (021) 5305073-74 | 0811.171.0055

info@isotekindo.co.id | www.isotekindo.co.id | isotekindo intertama | @isotekindo



linktr.ee/isotekindo

20250114/FZR