

JIANGSU Disposable Sampling Box

Kit pemeriksaan HPV DNA sederhana dan berkualitas


Dikemas terpisah (steril)

Brush dilengkapi *ball tip*

Expired date 24 Bulan

Kemasan 25 pcs/box

Memiliki AKL KEMENKES RI

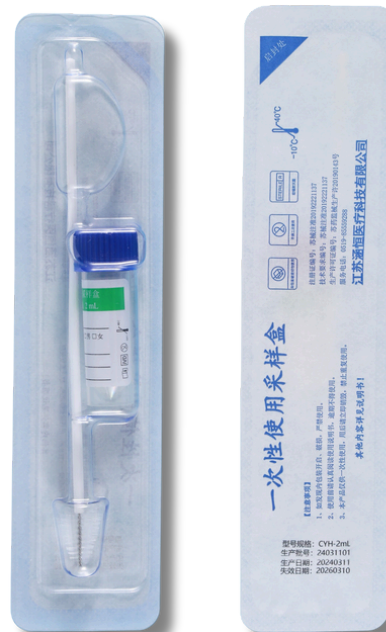

KEMENKES RI AKL 10302420101

Importir dan Distributor Resmi:

PT ISOTEKINDO INTERTAMA


📍 Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210 | 📞 (021) 5305073-74 | 📱 0811.171.0055

✉ info@isotekindo.co.id | 🌐 www.isotekindo.co.id | 🌐 isotekindo intertama | 📺 @isotekindo



linktr.ee/isotekindo

JIANGSU Disposable Sampling Box

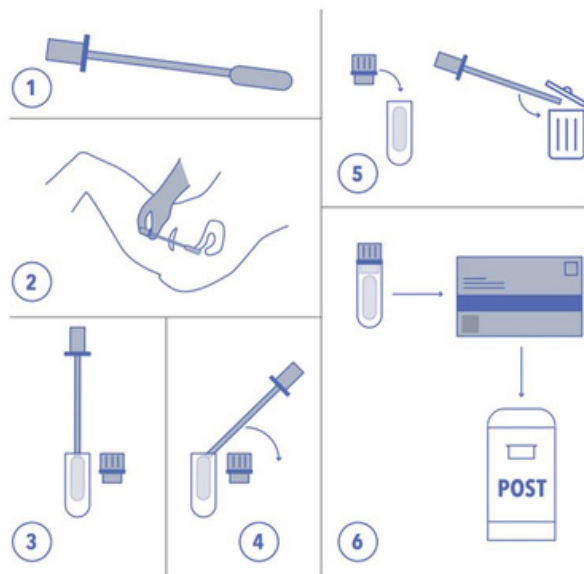

Cara penggunaan:

1. Preparasi kit, buka kemasan dan keluarkan sampling brush
2. Swab pada bagian serviks dengan brush dengan gerakan memutar 3-5 kali secara perlahan
3. Masukkan sampel ke dalam cairan preservation
4. Patahkan brush pada titik patah,
5. Tutup kembali tabung cairan preservation dan buang bagian brush yang sudah dipatahkan
6. Sampel dalam cairan preservation dapat digunakan dalam uji HPV DNA

Spesifikasi Brush:

- Material handle** : Polypropylene (PP)
Material head : Epoxy + serat nilon
Panjang : 17 cm
Posisi titik patah : 5 cm
Panjang head : 2 cm + ball tip
Diameter head : 1,5 cm



Spesifikasi *Specimen transport medium (STM)*:

Composition Name	Content (in% by weight)	Main Functions
Sodium Chloride	0.5%-1%	Adjust osmotic pressure of solution
Trimethylol aminomethane hydrochloride	0.1%-0.3%	Buffer agent
Edta disodium salt	0.1%-0.5%	stabilizer
Sodium hydroxide	0.01%-0.05%	Adjust PH
Purified water	98.15%-99.29%	Solvent

Importir dan Distributor Resmi:

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210 | (021) 5305073-74 | 0811.171.0055

info@isotekindo.co.id | www.isotekindo.co.id | isotekindo intertama | @isotekindo



linktr.ee/isotekindo