



UMONIUM³⁸
STERILY

“Urutan Pertama Proses Sterilisasi yang Berkualitas”



FORMULA BEBAS DARI

- KOMPONEN CMR**
- DISRUPTOR ENDOKRIN

** Carcinogenic, Mutagenic and Reprotoxic

Sediaan ukuran:
5 Liter & 1 Liter

Kenyataannya, tidak perlu produk enzim atau alkali untuk memastikan instrumen berkilau. Produk **UMONIUM³⁸ STERILY** membersihkan instrumen secara mendalam dengan penyikatan manual atau menggunakan ultrasonic bath. Cepat membunuh mikroorganisme (bakterisidal, virusidal, fungisidal, mikobakterisidal, dll), membuat instrumen menjadi berkilau, aman bagi operator, cairan tidak berbahaya jika bocor, tidak korosif, dan tidak mengandung uap beracun. Bahan disinfektan ini dapat terurai secara hayati, bisa langsung dibuang ke bak cuci dan air limbah tidak menimbulkan polusi.

Importir dan Distributor Resmi:

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210 | (021) 5305073-74 | 0811.171.0055

info@isotekindo.co.id | www.isotekindo.co.id | isotekindo intertama | @isotekindo



linktr.ee/isotekindo

20240924/FZR

INDIKASI

Pembersihan/cleaning dan pre-disinfeksi untuk alat kesehatan invasif sebelum sterilisasi. Persiapan untuk masuk proses disinfeksi

KOMPOSISI

N-benzil-N-dodesil-N,N-dimetilamonium klorida/N-benzil-N,N-dimetil-N-tetradesil-amonium klorida. 22g/L

STANDAR PERATURAN

- Mematuhi ED 93/42/EEC yang berkaitan dengan perangkat medis
- Kualitas & keterlacakan dijamin oleh ISO 9001:2015 dan EN ISO 13485:2016


INSTRUKSI PENGGUNAAN

Larutkan 25 ml konsentrasi ke dalam 5 L air (konsentrasi 0,5%), kemudian rendam & gosok/gunakan ultrasonic bath untuk menghilangkan semua kotoran. Bilas dengan air bersih sebelum disinfeksi

KARAKTERISTIK PRODUK

- **Alat kesehatan kelas IIb**
- Pembersih 0,5% pre-disinfektan
- **Tidak beracun, tidak membentuk gas berbahaya**
- LD50 (tikus): 5840 mg/kg
- **Non-korosif: pH 7**
- Tidak mengiritasi kulit
- Non-koagulan
- Tidak mudah terbakar
- Bakterisida, fungisida, mikobakterisida (termasuk MRSA) dan virusida
- **Bebas aldehida, peroksida, biguanida, tidak ada komponen CMR**
- **100% kompatibel pada berbagai macam bahan seperti serat optik, karet, polikarbonat, kaca, Pyrex, PVC, HDPE, PET, lateks, silikon**
- Efektif, cepat dan efisien (saat melarutkan kotoran)
- Efektif meskipun ada bahan organik
- Bekerja lebih cepat dari larutan enzim
- Tidak ada residu setelah dibilas
- **Stabilitas: 36 bulan sejak tanggal pembuatan**
- Dapat terurai secara hayati

PROSEDUR PENGGUNAAN

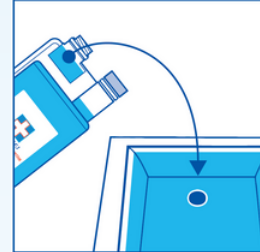

Larutkan 25 ml konsentrasi ke dalam 5L air (konsentrasi 0,5%)



Rendam & gosok/gunakan ultrasonic bath untuk menghilangkan semua kotoran



Bilas dengan air bersih sebelum disinfeksi

Importir dan Distributor Resmi:

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210 | (021) 5305073-74 | 0811.171.0055

info@isotekindo.co.id | www.isotekindo.co.id | isotekindo intertama | @isotekindo



linktr.ee/isotekindo

20240924/FZR