

WellPrep Hely6 Procesor

ALAT PERSIAPAN SAMPEL OTOMATIS UNTUK SPESIMEN
SITOLOGI GINEKOLOGI & NON GINEKOLOGI



- Menggunakan metode **double sentrifugasi - filtrasi**
- Desain alat **compact & elegan**
- **Running hingga 6 sampel dalam satu kali operasi (72 sampel/jam)**
- Tampilan layar **LED**
- Alat **mudah** digunakan
- Dapat digunakan untuk persiapan sampel **ginekologi dan non ginekologi**
- **Consumables terjamin** ketersediaannya

KEMENKES RI AKL10203220128(Alat)
KEMENKES RI AKL10204220341 (CytoGyn)

ADVANCE WAY TO DETECT CANCER

Importir dan Distributor Resmi:

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210 | (021) 5305073-74 | 0811.171.0055

info@isotekindo.co.id | www.isotekindo.co.id | isotekindo intertama | @isotekindo




linktr.ee/isotekindo

WellPrep Hely6 Processor

Prinsip Kerja




Pengguna

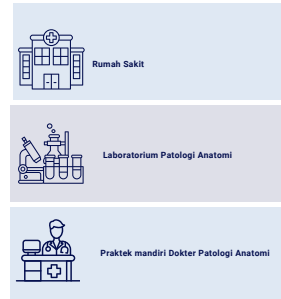


Cara Penggunaan




1 Nyalakan alat WellPrep Hely 6 Processor, dengan cara menekan tombol power

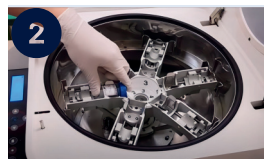

2 Susun kompartemen konsumable dari mulai CytoGyn, glass slide, filter paper, DRC opener, Dencity Reagen Chamber (DRC)

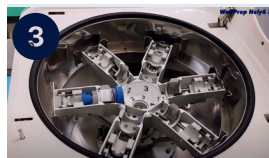

3 Susun CytoGyn dan kompartemen secara searah (atas-bawah) kemudian tutup alat

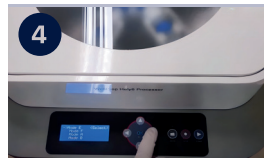

4 Lakukan setting mode, kemudian pilih Gynecology, selanjutnya klik start




5 Setelah selesai ambil filter paper dan glass slide secara bersamaan kemudian pisahkan dengan cara melepaskan filter paper dari glass slide masing-masing ke arah atas dan bawah

Spesifikasi

Dimensi	460x520x340 mm
Konsumsi Daya	100-240 V dan 50 – 60 Hz
Berat	30 Kg
Metode Preparasi	Sentrifugasi, filtrasi
Jumlah sampel /jam	70 sampel/jam
Suhu Penggunaan	18 – 40 °C
Power	500 watt
Kelembapan	20%-80%
Display Layar	LED latar belakang putih
Volume sampel	10 mL
Tujuan Penggunaan	Untuk persiapan sitologi dari spesimen cairan

Transport Media & Aksesoris

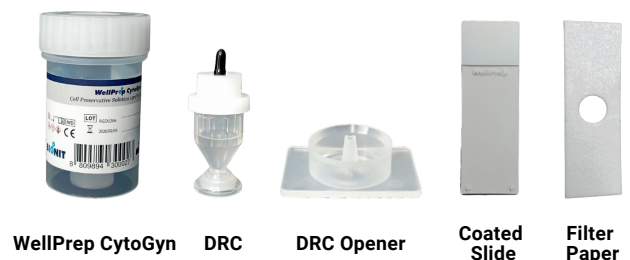

Importir dan Distributor Resmi:

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210 | (021) 5305073-74 | 0811.171.0055

info@isotekindo.co.id | www.isotekindo.co.id | isotekindo intertama | @isotekindo



linktr.ee/isotekindo

20240924/YEZ